

# Mikrobac® Tissues

Alkoholmentes törőlkendő érzékeny orvostechikai eszközök és felületek tisztító hatású fertőtlenítéséhez

## Tulajdonságok

- Felhasználásra kész felületfertőtlenítő törőlkendő
- Széles körben alkalmazható, kiváló nedvesítő- és tisztító tisztítóhatással rendelkezik
- Színezék-, illat-, alkohol- és aldehidmentes
- Kiemelkedően jó anyagkompatibilitás
- A kendők használata egyszerű és biztonságos, amit elősegít a praktikus, visszazárható csomagolás is
- XXL méretben is elérhető

A kiváló minőségű Baccalin kendők megfelelnek a legmagasabb higiénés előírásoknak is. A visszazárható csomagolásnak köszönhetően használatuk biztonságos, a kendők kontaminálódásának veszélye csekély.

## Összetétel

Az oldat hatóanyaga: Benzil-C12-18-alkildimetilammóniumklorid 4,0 mg/g, didecildimetilammóniumklorid 4,0 mg/g

## Hatásspektrum

- Baktericid
- Yeasticid
- Szelektív virucid (pl. HIV/HBV/HCV, Rota, MNV ellen hatékony)

## Alkalmazási terület

Mikrobac kendő minden mosható felszerelési, berendezési tárgy, orvostechikai eszköz és felület tisztító hatású fertőtlenítésére ajánlott.

- alkoholra érzékeny, vízbe nem meríthető orvostechikai eszközök fertőtlenítésére (pl. ultrahang fejek és szondák)

Alkalmas ezen kívül bármely alkoholra érzékeny vagy alkoholálló felület tisztító hatású fertőtlenítésére:

- kórházban, háziorvosi és magánrendelőben, fogorvosi rendelőben
- laboratóriumban
- ápolási otthonban
- kisebb felületek esetén (pl. ágykeret, WC ülőke, kilincs,...)

## Alkalmazás, behatási idő

A felületeket a törőlkendővel alaposan át kell törőlni úgy, hogy kezeletlen rész ne maradjon. Az idő előtti kiszáradást elkerülendő használat után, vagy a kendő kivételét követően a csomagolást gondosan vissza kell zárni.

Behatási idő: 5 perc

A felület a száradást követően használatba vehető.

## Anyag kompatibilitás

Burkolatok: mázas és máz nélküli kerámiaacempe, padlólap, téglaburkolat.

Fémek: alumínium, réz, sárgaréz, rozsdamentes acél

Műanyagok: poliamid, PVC, polietilén, polipropilén, polisztirol, szilikon, gumi, latex, Makrolon, akril, Teflon

## Kémiai-fizikai tulajdonságok

Sűrűség (20°C): kb. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

pH érték: kb. 8

Kendő mérete: 180 x 200 mm és 250 x 380 mm (XXL)

Kiszerezés: 80db kendő / csomag, 40db kendő / csomag (XXL)

Eltarthatóság: felbontást követően 3 hónap



## HARTMANN-RICO HUNGÁRIA KFT.

H-2051 Biatorbágy

Paul Hartmann u. 8.

Tel.:(+36) 23-530-950

Fax: (+36) 23-530-905

*A kémiai anyagokat biztonságosan alkalmazza. Használat előtt olvassa el a címkét és a használati utasítást!*